



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION
Địa chỉ: Nhà xưởng B16, Lô H, Khu Công Nghiệp Tân Kim, Khu phố Tân Phước, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khăn và Bộ Khăn Phẫu Thuật

1. Mô Tả:

- Khăn và bộ khăn phẫu thuật được làm từ chất liệu an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lớp vải: Sử dụng vải không dệt, không hút nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện và đạt tiêu chuẩn hiệu suất rào cản chất lỏng AAMI Level 3 theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI PB70.
- Vải không dệt Spunlace/Rayon thấm màu trắng: Vải màu trắng, mềm mại, khả năng thấm hút chất lỏng tốt, không sinh bụi vải, thích hợp để thấm dịch/máu trong phẫu thuật
- Vải siêu thấm: Khả năng thấm hút nước, dịch và cồn cao, không có bụi vải. Vải siêu thấm có lớp màng PE ngăn các mầm bệnh từ máu, dịch và cồn tiếp xúc với bệnh nhân.
- Vải bán thấm: Cấu tạo bởi lớp thấm hút chất lỏng và lớp không thấm hút.
- Băng keo y tế: Được cấp phép sử dụng trong ngành y tế và được chứng nhận không gây kích ứng da.
- Màng PE Film Xanh: Màng plastic màu xanh, không thấm, thành phần nguyên liệu không biến đổi trong quá trình tiệt trùng bằng khí EO.
- Nguyên vật liệu khác: Ngoài ra gồm các khăn gói và các loại khăn phụ kiện như, khăn thấm, bao chụp đầu đèn, túi remote, bao phủ chi, gạc y tế, băng keo y tế, kéo kocher, nhíp nhựa, chén nhựa, khay nhựa
- Bao gói tiệt trùng: Có khả năng thẩm thấu (khí EO), chịu được sức căng, nặng và có khả năng ngăn sự lây nhiễm từ bên ngoài. Tính chất nguyên liệu: Gồm 1 lớp giấy y tế hoặc Tyvek và 1 lớp màng PET-PE được ép dính với nhau.

2. Công Dụng:

Sản phẩm giúp đảm bảo an toàn cho bác sĩ, phẫu thuật viên, bệnh nhân và các dụng cụ, thiết bị trong các ca phẫu thuật - thủ thuật y tế.

3. Hướng Dẫn Sử Dụng:

Nhóm khăn và bộ khăn được sử dụng trong các ca phẫu thuật tổng quát, các ca phẫu thuật nhãn khoa, tai mũi họng, các ca phẫu thuật mổ tim hờ, can thiệp mạch, các ca sản khoa, các ca phẫu thuật chỉnh hình, các ca phẫu thuật sọ não, cột sống, phụ khoa hay tiết niệu... Tùy vào từng chức năng của sản phẩm, số lượng thành phần và phụ kiện đi kèm sẽ có hướng dẫn sử dụng cụ thể, như là:

3.1. Nhóm khăn và bộ khăn tổng quát:

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION
Địa chỉ: Nhà xưởng B16, Lô H, Khu Công Nghiệp Tân Kim, Khu phố Tân Phước, Thị trấn Tân Giuộc, Huyện Tân Giuộc, Tỉnh Long An.

- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định các khăn chính phủ xung quanh vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân

(Chú ý: Trong quá trình trải cần thực hiện phủ kín và cân xứng giữa hai bên)

- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Khăn đa dụng: Mục đích sử dụng linh hoạt tùy theo nhu cầu của bác sĩ và phẫu thuật viên.
 - Băng keo y tế : Dùng để cố định quần hoặc dán ống dây
 - Túi đựng (nếu có): Dùng để đựng dụng cụ, kim chỉ cho thao tác nhanh và đảm bảo an toàn vùng tiệt trùng
 - Khăn thấm: Dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường
 - Mànng phẫu thuật (nếu có) : Dùng để bảo vệ vùng phẫu trường
 - Áo phẫu thuật (nếu có): Dùng để bảo vệ phẫu thuật viên
 - Phụ kiện chuyên dụng: sử dụng 1 lần, được thêm vào tùy theo nhu cầu bác sĩ
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế.

3.2. Nhóm khăn và bộ khăn nhân khoa, tai mũi họng

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn tai mũi họng xung quanh vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân
- Cố định khăn mắt lên chỗ cần mổ bằng mànng phẫu thuật và trải dài khăn lên người bệnh nhân
- Phụ kiện chuyên dụng: Chỉ sử dụng 1 lần, tùy theo nhu cầu bác sĩ yêu cầu được thêm vào hay không
- Áo phẫu thuật (nếu có): Dùng để bảo vệ phẫu thuật viên
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế

3.3. Nhóm khăn và bộ khăn mổ tim hở

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION

Địa chỉ: Nhà xưởng B16, Lô H, Khu Công Nghiệp Tân Kim, Khu phố Tân Phước, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định các khăn chính phủ xung quanh vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân

(Chú ý: Trong quá trình trải cần thực hiện phủ kín và cân xứng giữa hai bên)

- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Khăn đa dụng, khăn không keo: Khăn này sử dụng linh hoạt
 - Băng keo y tế: Dùng để cố định quần hoặc dán ống dây
 - Túi đựng dụng cụ: Dùng để đựng dụng cụ kim chỉ cho thao tác nhanh và đảm bảo an toàn
 - Khăn thấm: Dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường
 - Áo phẫu thuật (nếu có): Dùng để bảo vệ phẫu thuật viên
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế

3.4. Nhóm khăn và bộ khăn phẫu thuật sơ não, cột sống

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn phẫu thuật lên vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Khăn có keo, tấm trải dụng cụ: Mục đích sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của bác sĩ và phẫu thuật viên
 - Băng keo y tế: Dùng để cố định quần hoặc dán ống dây
 - Khăn thấm: Dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường
 - Bao chụp đầu đèn: Bao phủ đầu đèn trong phòng mổ
 - Áo phẫu thuật (nếu có): Dùng để bảo vệ phẫu thuật viên
 - Bao kính chắn chì: Bao phủ kính chắn chì trong phòng mổ
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế và xử lý theo quy định

3.5. Nhóm khăn và bộ khăn tiết niệu – phụ khoa

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn chính trên vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Băng keo y tế: Dùng để cố định quần hoặc dán ống dây
 - Áo phẫu thuật (nếu có): Dùng để bảo vệ phẫu thuật viên
 - Phụ kiện chuyên dụng: Chỉ sử dụng 1 lần, tùy theo nhu cầu bác sĩ yêu cầu được thêm vào hay không
 - Khăn thấm: Dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế.

3.6. Nhóm khăn và bộ khăn sản khoa

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn bằng màng phẫu thuật trên vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân
- Khăn thấm: Dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường
- Khăn em bé: Dùng để lót nôi sau khi sinh
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có
 - Phụ kiện chuyên dụng: Chỉ sử dụng 1 lần, tùy theo nhu cầu bác sĩ yêu cầu được thêm vào hay không
 - Băng keo y tế: Dùng để cố định quần hoặc dán ống dây
 - Màng phẫu thuật: Dùng để vô trùng vùng phẫu trường
 - Áo phẫu thuật (nếu có): Dùng để bảo vệ phẫu thuật viên
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế và xử lý theo quy định

3.7. Nhóm khăn và bộ khăn can thiệp mạch

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định khăn chụp mạch vành bằng màng phẫu thuật trên hai bên đùi và tay (nếu có) và trải dài trên người bệnh nhân
- Bao chụp đầu đèn: Bao phủ đầu đèn trong phòng mổ
- Bao kính chắn chì: Bao phủ kính chắn chì trong phòng mổ
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có:
 - Khăn đa dụng: Mục đích sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của bác sĩ và phẫu thuật viên
 - Túi đựng: Dùng để đựng dụng cụ, kim chỉ cho thao tác nhanh và đảm bảo an toàn vùng tiệt trùng
 - Khăn thấm: Dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường
 - Phụ kiện chuyên dụng: Chỉ sử dụng 1 lần, tùy theo nhu cầu bác sĩ yêu cầu được thêm vào hay không
 - Áo phẫu thuật (nếu có): Dùng để bảo vệ phẫu thuật viên
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế

3.8. Nhóm khăn và bộ khăn chỉnh hình tổng quát

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
- Trải khăn bàn dụng cụ và khăn trải bàn Mayo (nếu có)
- Cố định các khăn chính phủ xung quanh vùng phẫu trường và trải dài trên người bệnh nhân
 - Khăn chỉnh hình tổng quát (thay khớp háng)
 - Khăn nội soi khớp gối
 - Khăn nội soi khớp vai
 - Khăn phẫu thuật chi trên (tay)
 - Khăn phẫu thuật chi dưới (chân)
 - Khăn phẫu thuật xương đòn
- Ngoài ra trong bộ sản phẩm còn có

- Khăn đa dụng, khăn không keo: Mục đích sử dụng linh hoạt theo nhu cầu của bác sĩ và phẫu thuật viên
 - Băng keo y tế: Dùng để cố định ống dây
 - Khăn U: Phủ lên khu vực xung quanh vùng phẫu trường
 - Khăn thấm: dùng để lau tay trước khi đeo găng tay hoặc thấm Betadine ở vùng phẫu trường
 - Khăn đa dụng: Mục đích sử dụng linh hoạt tùy theo nhu cầu của bác sĩ và phẫu thuật viên
 - Túi đựng: Dùng để đựng dụng cụ, kim chỉ cho thao tác nhanh và đảm bảo an toàn
 - Bao phủ chi: dùng xô vào chi trên hay chi dưới tùy yêu cầu ca phẫu thuật
 - Áo phẫu thuật (nếu có): Dùng để bảo vệ phẫu thuật viên
- Sau khi đã hoàn tất các ca phẫu thuật thì bỏ các vật dụng vào khu vực rác y tế và được xử lý theo quy định

3.9. Nhóm khăn lễ, phụ kiện

Nhóm phụ kiện y tế dùng một lần bao gồm các nhóm nhỏ như bao chụp đầu đèn, bao phủ chi, túi đựng cụ, màng phẫu thuật, khăn gói dụng cụ, khăn mayo, khăn thấm, khăn trải bàn dụng cụ, bao đựng remote, băng keo y tế,... là các phụ kiện dùng 1 lần trong các ca phẫu thuật.

- Kiểm tra bao bì của sản phẩm (không lủng rách, chú ý thông tin trên nhãn như tên, số lô, hạn sử dụng,...)
- Tiến hành vệ sinh tay bằng xà phòng diệt khuẩn, có thể sử dụng khăn tay thấm để làm khô tay trước khi bắt đầu các thao tác khác
- Tiến hành mở bao bì để bộ sản phẩm/ sản phẩm lên trên bàn dụng cụ phẫu thuật
 - Bao chụp đầu đèn: Màng phim PE trong không thấm chất lỏng, không thấm cồn...
 - Túi chứa dịch: với chất liệu plastic trong, không thấm nước được tích hợp băng keo lên túi, thuận tiện cho bác sĩ dán lên khăn với từng mục đích khác nhau
 - Màng phẫu thuật: dùng để dán lên người bệnh nhân, bảo vệ vùng phẫu trường của bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật, không gây kích ứng da
 - Vải gói dụng cụ: được làm bằng vải không dệt, chống tĩnh điện, không thấm nước
 - Trải khăn theo từng chức năng tương ứng với từng sản phẩm lên người bệnh, lên dụng cụ phẫu thuật



VT Production

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION

Địa chỉ: Nhà xưởng B16, Lô H, Khu Công Nghiệp Tân Kim, Khu phố Tân Phước, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

4. Hướng Dẫn Khác:

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Chỉ sử dụng một lần, không tái sử dụng sản phẩm.
- Không sử dụng khi bao bì có dấu hiệu hư hỏng.
- Sản phẩm sau khi sử dụng phải được bỏ vào khu vực rác thải y tế và xử lý theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phước Thịnh