

THƯ MỜI HỢP TÁC

phân phối sản phẩm que thử thai và que thử rụng trứng
kênh OTC

Về chúng tôi

Tự hào là nhà sản xuất IVD hàng đầu tại Hàn Quốc, Humasis luôn cố gắng không ngừng để đưa sản phẩm của mình đến tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Với hơn 20 năm vận hành chuyên nghiệp, chúng tôi có 129 sản phẩm test nhanh và thiết bị chẩn đoán đã và đang được xuất khẩu đến hơn 46 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp các châu lục, trong đó có Việt Nam.

Đối tượng nhà phân phối và bán lẻ chúng tôi đang tìm kiếm

- Nhà thuốc
- Siêu thị, cửa hàng tiện lợi
- Cửa hàng giao dịch trực tuyến
- Các kênh phân phối khác

Đặc biệt, các sản phẩm được phép mua bán tự do không cần công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế B, C, D (quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2022/TT-BYT) nên phù hợp với mọi đối tượng kinh doanh.

Vì sao chọn hợp tác với chúng tôi

- Thương hiệu nổi bật
- Sản phẩm chất lượng
- Chuyên môn cao
- Khả năng cung ứng rộng
- Tập sản phẩm mở rộng đa dạng

Sản phẩm mời hợp tác

Sản phẩm	Que thử thai Hello Baby Plus	Que thử thai Safely Pregnancy	Que thử rụng trứng Safely Ovulation
			
Số lượng bán ra tại Hàn Quốc trong 3 năm gần nhất	> 10 triệu test		
Tại Hàn Quốc	<ul style="list-style-type: none">◦ Hầu hết các hệ thống nhà thuốc và các nhà thuốc trên toàn quốc◦ Hệ thống các cửa hàng tiện lợi như GS25, Seven Eleven, CU vv.◦ Hệ thống phân phối e-commerce		

Liên hệ với chúng tôi

ĐT: 028 7300 8848 - 101 / Hotline 0903671512 (Ms. Thương)

Email: humasisvina@humasis.com

Sản phẩm mời hợp tác

Que thử thai Hello Baby Plus



Số lưu hành: 220000783/PCBB-BYT

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm	Quy cách	Giới hạn phát hiện	Loại mẫu	Hạn sử dụng	Độ chính xác	Đọc kết quả
Hello Baby Plus (ANPP-2001)	01 test/hộp	15 mIU/mL	Nước tiểu	36 tháng	> 99%	Trong 03 phút

Hướng dẫn sử dụng

Phương pháp hứng



00:05 Đặt đầu thấm hút trong dòng nước tiểu ít nhất 5 giây

03:00 Chờ 03 phút và đọc kết quả

Phương pháp nhúng



Thu nước tiểu



Nhúng trong 5 giây

3 phút



Đọc kết quả

Sản phẩm mời hợp tác

Que thử thai Safely Pregnancy




Số lưu hành: 220000783/PCBB-BYT

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm	Quy cách	Giới hạn phát hiện	Loại mẫu	Hạn sử dụng	Độ chính xác	Đọc kết quả
Safely Pregnancy	1 test/hộp	25 mIU/mL	Nước tiểu	36 tháng	> 99%	Trong 05 phút

Hướng dẫn sử dụng

Phương pháp hứng

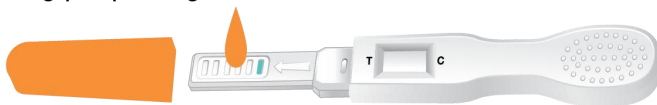

00:05

Đặt đầu thấm hút trong dòng nước tiểu ít nhất 05 giây

05:00

Chờ 05 phút và đọc kết quả

Phương pháp nhúng



Thu nước tiểu



Nhúng trong 05 giây


5 phút



Đọc kết quả

Sản phẩm mới hợp tác

Que thử rụng trứng Safely Ovulation

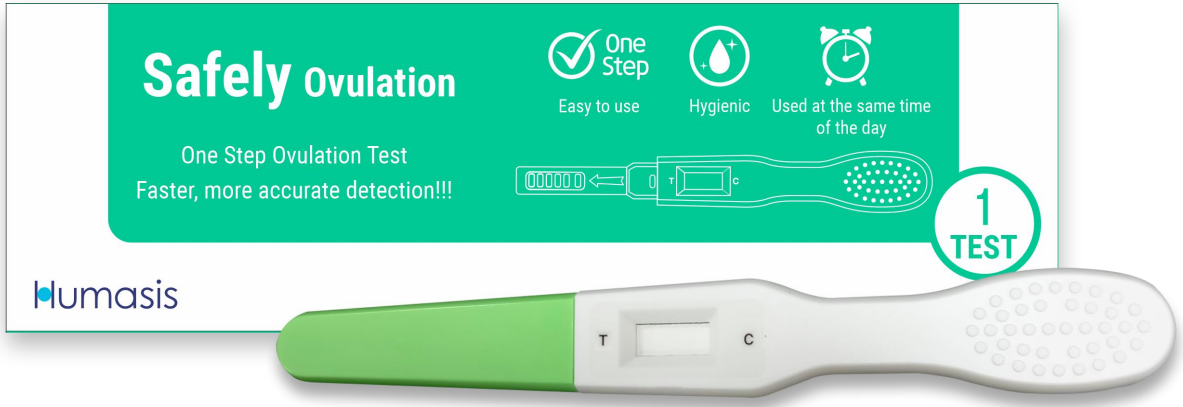

Số lưu hành: 220001593/PCBB-BYT

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm	Quy cách	Giới hạn phát hiện	Loại mẫu	Hạn sử dụng	Độ chính xác	Đọc kết quả
Safely Ovulation	1 test/hộp 3 test/hộp	40 mIU/mL	Nước tiểu	24 tháng	> 99%	Trong 05 phút

Hướng dẫn sử dụng

Phương pháp hứng



- 00:10** Đặt đầu thấm hút trong dòng nước tiểu ít nhất 10 giây
- 05:00** Chờ 05 phút và đọc kết quả

Phương pháp nhúng



5 phút



- T C** 1 ngày
- T C** 2 ngày
- T C** 3 ngày

Thu nước tiểu

Nhúng trong 10 giây

Đọc kết quả